



1.



Vérifier que la sangle n'est pas coupée, effilochée, vrillée, endommagée ou souillée par des vernis, huiles ou produits chimiques.



2.




Vérifier que l'unité est alimentée. Si l'alimentation est coupée, l'unité fonctionnera mécaniquement. Pas d'alimentation ? Cela ne signifie pas que l'unité ne fonctionne pas, c'est seulement qu'il faut y prêter attention.



3.



Tirer les crochets et la sangle alors que l'alimentation est en marche et que l'alarme sonne pour vérifier si la sangle bouge librement. Une fois que l'alarme s'arrête, le crochet de la sangle (enrouleur) devrait être en position verrouillée, et se rétracter uniquement lorsque vous relâchez la pression.

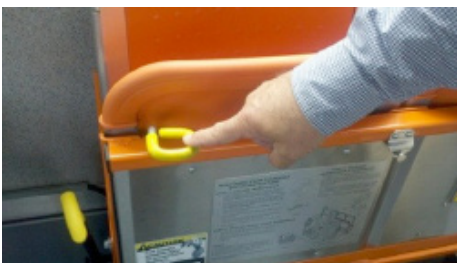

4.



Vérifier le mécanisme de verrouillage du coussin du siège rabattable pour s'assurer que le dispositif de verrouillage s'engage totalement aussi bien en position baissée que relevée.



5.



Vérifier les sangles abdominale et diagonale pour s'assurer qu'elles ne sont pas coupées, effilochées, vrillées, endommagées ou souillées par des vernis, lotions, huiles ou produits chimiques.



6.



Utiliser le mécanisme avant du QPOD pour vérifier son bon fonctionnement. Écouter les clics des crans de verrouillage.

7.



Mécanisme avant du QPOD : Tirer sur le crochet alors que le levier de dégagement est en position rabattue, le crochet devrait bouger librement. Une fois que le levier de dégagement est tiré vers vous en position serrée, le crochet et la sangle devraient être verrouillés. Il ne devrait plus être possible de dérouler la sangle, le crochet et la sangle ne devraient plus s'enrouler dans le mécanisme.